

2018年2月吉日

お取引各店様

厳寒の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

去る1月に画期的な新製品 Signia Nx が発売いたしました。お陰様で大変好評を頂いております。今回は、新製品 Signia Nx のお役立ち情報をお届けいたします。今後も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

記

発売から約1か月が経過し、お陰様で多くのお客様に試聴体験していただいております。調査を実施したところ、新製品 Signia Nx の満足度が93%に達している事が判明しました！

※Signia Nx を試聴し、「とても満足された」「満足された」と答えられたお客様の割合
 ※2018年2月現在 自社調べ。N=233


〈高い満足度の理由 TOP5〉

- 1、音質が良く、自然で違和感ない
- 2、会話の明瞭度、聞きやすさ
- 3、自分の声に違和感がない
- 4、テレビ・周辺機器
- 5、そのほか、方向感



《会話の明瞭度、聞きやすさの成功事例》

- 使用器種: Pure3mi
 - 計算式: micon fit 標準
 - ドーム(耳栓): オープン
 - ・これまで、クローズにしたかったが違和感あった。
 - ・オープンのため、利得も上げられなかった
 - Pure 312 3Nx 試聴
 - 計算式: Nx fit 標準
 - ドーム(耳栓): クリックスリーブ穴有
- 《効果》
- micon 時 14dB → Signia Nx 24dB(平均利得)
 - ・クリックスリーブにした結果、装用閾値 UP
 - ・しっかり音が入り、明瞭度も UP
 - ・こもり感もあまり感じず、ご購入へ

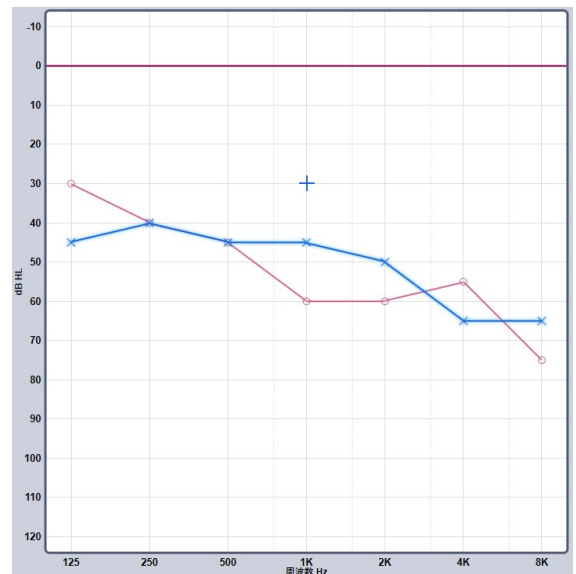

以上

シバントス株式会社

「シーメンス・シグニア補聴器」カスタマーサービス部
 TEL. 0800-222-4133 FAX. 0800-888-4133 cs.jp@sivantos.com