

2018年3月吉日

お取引各店様

早春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。


去る1月に画期的な新製品 Signia Nx を発売いたしました。お陰様で大変ご好評を頂いております。新製品 Signia Nx のお役立ち情報をお届けいたします。今後も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

記

発売から約2か月が経過し、高い満足度を得られている Signia Nx。今回は新機能「OVP」を使用して自分の声の違和感について調査を実施。約80%の方が「自分の声の違和感が改善された」というデータを取ることが出来ました。


※Signia Nx を OVP 機能付きで試聴し、機能 OFF の時と比べ「自分の声の違和感が改善できた」と答えられたお客様の割合
 ※2018年2月現在 自社調べ。N=415

《OVP の効果について》

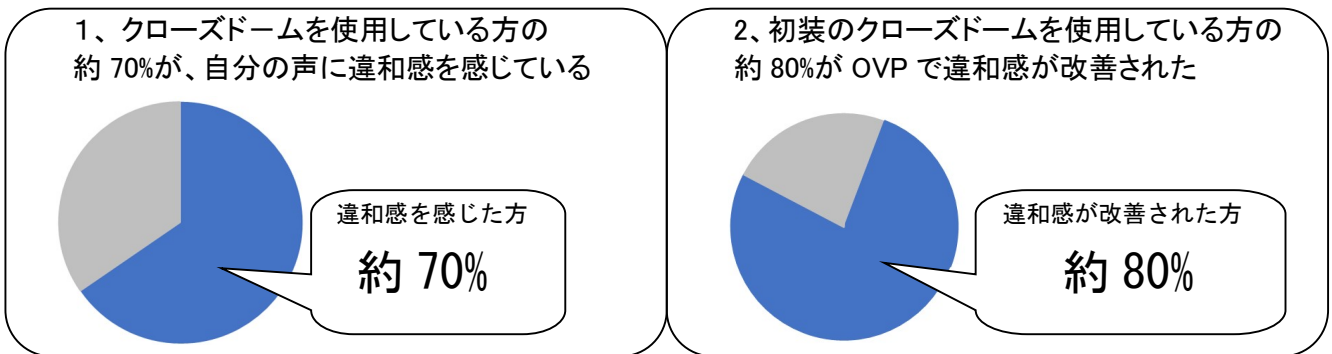

《初装の方の「違和感」が改善されたことで、生活が変わった成功事例》

- 学生、補聴器経験なし
- 普段問題なし、TV 大きめ、英語のリスニング時に不便を感じる
- Nx Fit 標準にてファーストフィット、S レシーバー、6mm クローズ
 - キンキンするとのことで 8kHz 付近 Down + OVP で解消
 - リスニング自体は、装用前より向上している模様

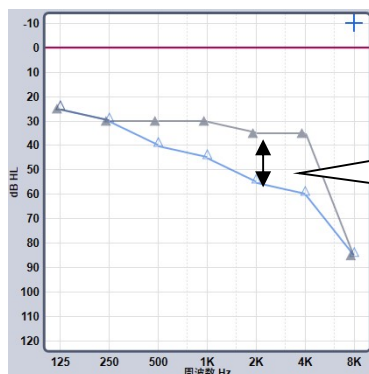


《装用前》

- ・最高明瞭度は残っている
- ・リスニング時に不便を感じてしまう

《装用後の考察》

- ・8kHz はまだ上げられていない
- ・2~4kHz 付近は改善がみられる
- ・結果、リスニングが向上した

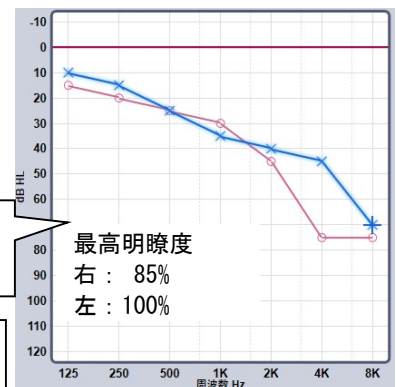

以上

シバントス株式会社

「シーメンス・シグニア補聴器」カスタマーサービス部
 TEL. 0800-222-4133 FAX. 0800-888-4133 cs.jp@sivantos.com