

miniPocket 操作の手順 (販売店様用)

www.signia-pro.jp

signia

Hearing
Systems

SIEMENS

1、ミニポケットと補聴器のペアリング手順



1. HA を耳に着けて電源を入れる
2. ロックを下げる
3. P を押しながらロックを上げる (LED 点灯)
4. P を放す
5. もう一度、P を押す。HA から「ピッ」と聞こえる。
6. 再度ロックを下げて上げる (LED 消灯)
7. これで終了です

2、調節音の音量を変えるには



ミニポケットから補聴器を調節する調節音の大きさは大/小2つあります。初期設定は大です。もし周りの方がうるさがる場合には音量を下げます。

1. ロックを下げる
2. P を押しながらロックを上げる (LED 点灯)
3. P を放す
4. ⊖ を押し続けると調節音が小になり LED がゆっくり光る。
5. ⊕ を押し続けると調節音が大になり LED が速く光る。
6. 再度ロックを下げて上げる (LED 消灯)
7. これで終了です

sivantos

シバントス株式会社

「シーメンス・シグニア補聴器」カスタマーサービス部
TEL.0800-222-4133 FAX.0800-888-4133 cs.jp@sivantos.com

3、ミニポケットのご紹介



[リモコン機能]

プログラム、ボリューム、ミュート、標準

[お奨めできるお客様]

- 目がお悪い方に。細かい操作なし。
- 小型補聴器が希望の方に。VC、PB できません
- 女性客に。バッグのポケットにもかさばりません。
- 男性客に。ズボンのポケットが膨らみません。
- スマホを持っていない方に。

[使える補聴器]

- Sirion2, Orion2, binax, primax の全部。
- CIC でも Ace でも使えます。

4、ミニポケットの通常操作（エンドユーザー様の操作）



[ボリューム]

⊕、⊖

[プログラム切換え]

P

[ミュート]

P と ⊖ を長押し 2 秒。再度長押しで解除。

[標準設定に戻す]

P を長押し 2 秒。電池を入れた時の状態に戻る。

5、その他情報

1. Connexx に miniPocket は表示されません。
 - miniPocket を使うのに Connexx は不要です。
 - ペアリングするだけでご使用になれます。
2. 補聴器に調整ケーブルが付いた状態でも miniPocket とペアリングできます。
3. easyTek や easyPocket と同時にご使用することも可能です。
4. 一つの miniPocket でペアになるのは一組の補聴器だけです。
 - 自分の miniPocket が他人の補聴器を調節してしまうことはありません。
 - 自分の補聴器が他人の miniPocket から調節されてしまうこともありません。
5. 別の miniPocket に補聴器をペアにするには、別の miniPocket とペアリングしなおすだけで結構です。自動的に前の miniPocket はペアリングが外れます。
6. 電池は CR2450 × 1 コで約 1 年使用。交換用の電池は家電量販店やホームセンター、ネット通販などでお買い求めください。