

ウィンドスクリーンMF1 交換手順書

<対象商品>

対象品番	商品名	イメージ
10956737	INSIO 7NX ITC TWIN	
10956739	INSIO 5NX ITC TWIN	
10956740	INSIO 3NX ITC TWIN	
10956741	INSIO 7NX ITE TWIN	
10956742	INSIO 5NX ITE TWIN	
10956743	INSIO 3NX ITE TWIN	


<用意するもの>

対象品番	商品名	イメージ
10541504	ウィンドスクリーン MF1 (10 粒入)	
10147702	交換ツール ウィンドスクリーン MF1 用	


<交換方法>

古いウィンドスクリーンの取り外し

- ①交換ツールのネジの側を
補聴器のウィンドスクリーンにねじ込む

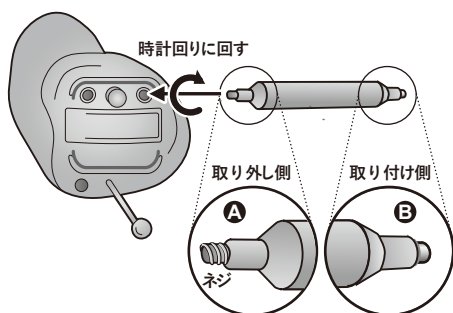


- ②ひと山ほどくい込ませ
交換ツールを引っ張って外す。

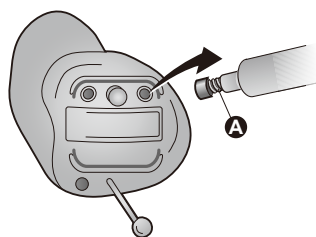

新しいウィンドスクリーンの取り付け

- ①交換ツールの取り付け側Bに
新しいウィンドスクリーンをはめる。
ウィンドスクリーンには網の位置が深い方と
浅い方があり、深い方にはめ込む。

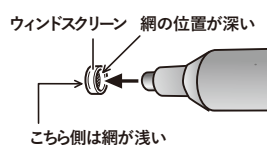

- ②新しいウィンドスクリーンを元のところに、
補聴器の面と同じ高さになるまではめ込む。
交換ツールを引き抜くと、ウィンドスクリーンは
補聴器に取り付けられたままになる。

