






















easyPocket 設定ガイド 第1版 販売店様用

www.siemens.co.jp/hearing

SIEMENS

特徴

- easyPocket は補聴器の基本操作+αができる micon にお奨めの液晶ディスプレイ付きのリモコンです。
- ボリューム、プログラム切換といった基本操作に加えて、補聴器をミュート／標準状態に戻す／アラーム時計や、販売店情報／easyPocket の表示ができます。
- 動作はシンプル操作のベーシックモードと、便利な操作のアドバンスモードの二つから選べます。工場出荷状態はベーシックモードでそのまますぐに使えます。CONNEXX に接続するとアドバンスモードになります。

	ベーシックモード(工場出荷状態)	アドバンスモード(Connexxでプログラムします)
メインボタン	プログラム切換 No. 表示なし 	プログラム切換 No. 表示あり 
	ボリューム 	ボリューム 
サブボタン	標準状態に戻す 	標準状態に戻す 
	ミュート 	ミュート 
	サウンドバランス (高域調節) 	サウンドバランス (高域調節) 
	プログラム 直接選択 	プログラム 直接選択 
	ノイズボリューム (SG、医療関係者向け) 	ノイズボリューム (SG、医療関係者向け) 
		この中から 二つ選択し サブボタンに 割り当てます 
メニューで設定	アラーム時計 	アラーム時計 
	販売店情報 	販売店情報 
	リモコンの電池残量 	リモコンの電池残量 


【注】：easyPocket は補聴器の読み取りはできません。テレビ、携帯のストリーミングはできません。

主な仕様

- ・ 対応Connexx 7.1以上
- ・ 電池 単4×2本
- ・ 電池寿命 約1年
- ・ e2eワイヤレス周波数 3.28MHz
- ・ 通信距離 1m以内

各部の名称


- ① ディスプレイ
- ② ロックスイッチ
- ③ PC接続端子
- ④ サブボタン
- ⑤ プログラムボタン
- ⑥ ボリューム + ボタン
ボリューム - ボタン

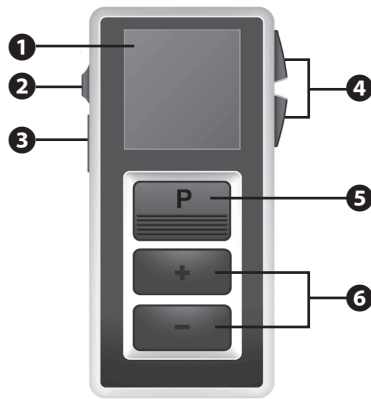

■ ディスプレイの例



ベーシック

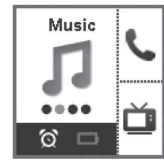


アドバンス

easyPocketを使う


1. ベーシックモードで使う

- easyPocketはPCにつなぎません。
- ConnexxでeasyPocketを選び「リモコン有効」にします。
- これだけでベーシックモードで使えます。

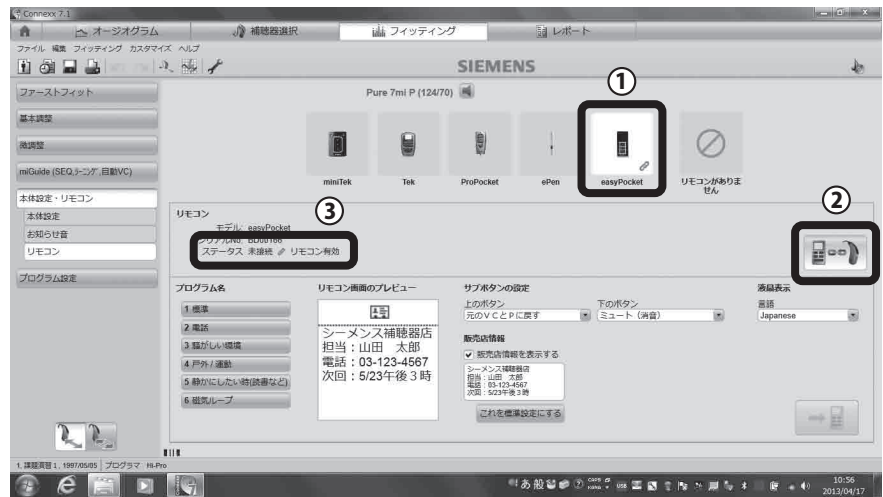

2. アドバンスモードで使う


- easyPocketのPC接続端子からミニUSBケーブルでPCにつなぎます。(ミニUSBケーブルはTekやminiTekで使うケーブルです。)
- 【注】** easyPocketのプログラムは何番でもOKです。ドライバーは自動でインストールされます。ロックスイッチは解除しておいてください。接続中はeasyPocketを操作できません。

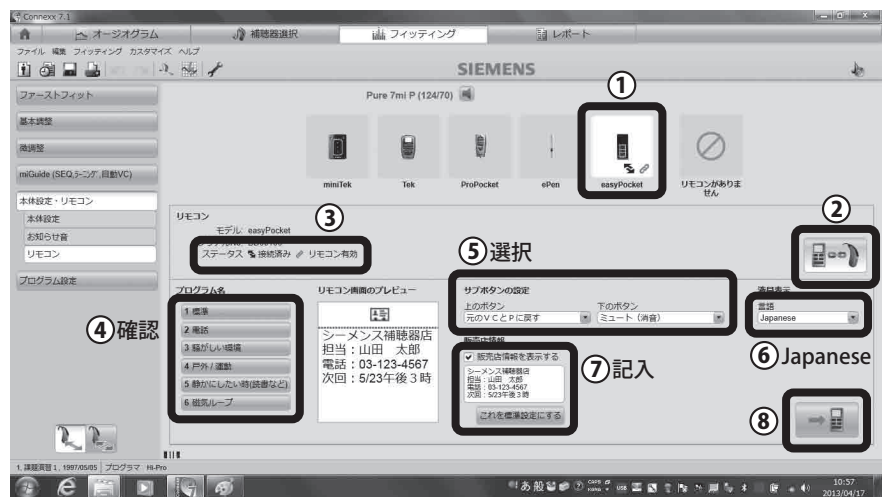

- ConnexxでeasyPocketを選び「リモコン有効」にしてください。
- サブボタンと販売店情報を設定してプログラムします。
- ディスプレイが書き込み中から接続中に戻ったらミニUSBケーブルを外します。
- これでアドバンスモードとして使えるようになります。



書き込み中

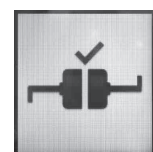

接続中

【メモ】 アドバンスモードからベーシックモードに戻すには、次のページのリセットを行います。

メニューの使い方

easyPocket では「P」「+」「-」「サブボタン」の他にメニューからアクセスできる機能があります。メニューからアクセスできる機能は標準設定、消音(ミュート)、アラーム、時計、メモ、インフォです。

基本操作 ① 「+」と「-」を同時に押してメニューに入ります。

基本操作 ② 「+/-」でメニューリストのカーソルを上下に動かし「P」で選択します。「戻る」で「P」を押すとメニューから出ます。

標準設定 … 動作: 補聴器を標準設定にします。(プログラム1、ボリューム標準)ベーシックモードのサブボタン上と同じです。

戻り方: 数秒後にディスプレイが切り換わり自動でメニューから出ます。

消音/出力 … 動作: 補聴器をミュートします。ベーシックモードのサブボタン下と同じです。

戻り方: 「P」を2回押すと音が出てメニューから出ます。

アラーム … 動作: 毎日セットした時刻に補聴器からアラームが流れます。その後 easyPocket のいずれかのボタンを押すともう一度流れます。

注意: アラームの音色は固定です。アラームの音量は変更できます。販売店にご相談ください。補聴器と easyPocket は1m以内に置いてください。1m以上だとアラームは鳴りません。

設定: 「+/-」で時間を合わせ(図.1)、「P」でカーソルを動かして「+/-」で分を合わせます(図.2)。再度「P」でカーソルを動かして「+/-」でアラーム ON/OFF を選び(図.3)、「P」で決定します(図.4)。

戻り方: 数秒後にディスプレイが切り換わり自動でメニューから出ます(図.5)。

【注】: アラーム音を出すには Connexx で「お知らせ音」の「電源オン/オフ」にチェックを入れてください。

時計 … 動作: アラームを動かすための easyPocket の内部時計を正しく合わせます。

設定: 「+/-」で時間を合わせ(図.6)、「P」でカーソルを動かして「+/-」で分を合わせ、「P」で決定します。

戻り方: 数秒後にディスプレイが切り換わり自動でメニューから出ます。

注意: 現在時刻は「+」と「-」を同時に押してメニューに入ると表示できます(図.7)。

電池を外すと時計は止まります。再度合わせ直してください。

【注】: 次の場合は時計が狂います。メニューから時刻合わせをしてください。

- ① easyPocket の電池を抜いた(時計が止まります)
- ② PC に接続した(アドバンスモード: 接続中は時計が止まります)
- ③ 時刻が正しくない PC からプログラムした(アドバンスモード: PC の時刻がプログラムされます)

メモ … 動作: 販売店からの情報を表示します。 **戻り方:** 「P」を押すとメニューから出ます。

インフォ … 動作: easyPocket の電池残量とバージョンを表示します。 **戻り方:** 「P」を押すとメニューから出ます。

ご夫婦でお使いの場合 お近くで2台の easyPocket を使うと混信する場合があります。その場合は Connexx で一台のワイヤレスアドレスを変更してください。

easyPocket のリセット 万が一フリーズなどの異常が起きた場合は次の手順で easyPocket をリセットしてください。リセット後は工場出荷状態に戻ります。(ベーシックモード)

- 電池を一本外し、サブボタン上下とボリューム+の3つを同時に押しながら外した電池を入れます。数秒後にディスプレイが点灯したらリセット完了です。

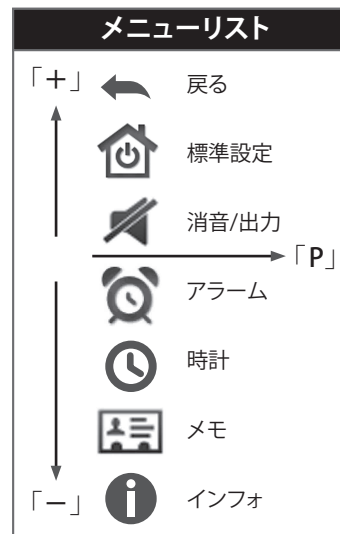


図.1



図.2



図.3



図.4



図.5

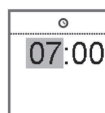


図.6



図.7

シーメンスヒヤリングインスツルメンツ株式会社

本社: 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野5-29-15

■販売店様専用問合せ窓口

☎ 0800-222-4133 Fax. 0800-888-4133

Tel. 042-765-7211 Fax. 042-765-7237

ホームページ: <http://www.siemens.co.jp/hearing>

13.05.キ-17009164