

※参考ですので、お客様の反応によって変更して下さい。

試聴の際は「(1) 耳栓/ベントを選ぶ」で変更し、ファーストフィットして下さい

			対応聴力 500Hz	装着感	その他	オススメの方
オープン	4mm		~40dB	極端に耳道が細い方に非常に軽い	抜けやすいので注意	初めてでこもりやすい方
	8mm 10mm			耳を圧迫した感じがない	低域が抜け、入らない	
クローズ	Semi チューリップ		~50dB	着けている感じが軽い オープンに比べて音量感が少し出る	オープンとクローズの間の装着感	初めての方や元々オープンを使用していてある程度の音量感が必要な方
	クリック スリーブ (穴あり)				カーブがあるため装着感が良い	
	6mm 8mm		50dB~	着けている感じが軽い チューリップやスリーブ穴なしに比べて音量感が出る	耳道が大きい場合は隙間に注意	低域が落ちており、しっかり実感頂きたい方
	クリック スリーブ (穴なし)				カーブがあるため装着感が良い	
	ダブル		60dB~	耳に挿れた感じは大きい 音量感が出る	クローズより音量感増ししっかりした装着感	
	イヤチップ		80dB~	しっかりした装着感 音量感もさらに強まる	耳道に対しピッタリ装着させた方が良い	

