

# 自声の処理をする設定方法 (OVP)

※ 3Nx以上で片耳、Pure10、耳あな型は対象外。2Nx、1Nx全形状は対象外

ファーストフィット後に、  
こちらの設定へ

## ① 録音の準備

① 自声処理を選択 (OVP)

② 録音を準備

③ 録音スタート

## ② 録音の開始

④ 画面が出たら「どうぞ」と合図を出す

⑤ 語尾を伸ばして数字を読み上げる

⑥ チェックが出れば完了

お客様の声を登録する前に  
2019年4月版

自分の声をより正確に録音するために

- ✓ 帽子、マスクは外してください
- ✓ 出来るだけ静かな環境で。
- ✓ 椅子に座り、まっすぐ向いてください
- ✓ 合図を出したら始めてください

はっきりと、区切らずに、声をしっかり出して、読み上げてください

OWN VOICE OVP

イチ ⇨ ニー ⇨ サーン ⇨ シー ⇨ ゴー  
ローグ ⇨ ナーナ ⇨ ハーチ ⇨ キューウ ⇨ ジューウ  
イチ ⇨ ニー ⇨ サーン ⇨ シー ⇨ ゴー

これで録音は完了。さらに試聴効果を上げる方法は次頁へ

# 自声の処理をする設定方法 (OVP)

※ 3Nx以上で片耳、Pure10、耳あな型は対象外。2Nx、1Nx全形状は対象外

## ● 録音時のポイント

### ポイント1：開始の合図を出す


画面上に「ピーというお知らせ音が聞こえたら…」とありますが、右の画面に切り替わったら「どうぞ！」と合図を出すと録音しやすいです



### ポイント2：大きめ、まっすぐ、指を見せる

イーチ、二ー、サーン…と数字を読み上げる際、


- ・ **はっきり、ゆっくり、大きめの声**で読み上げる
- ・ **正面をむいて**読み上げる
- ・ **指を見せてあげる**と、お客様も発声しやすいです

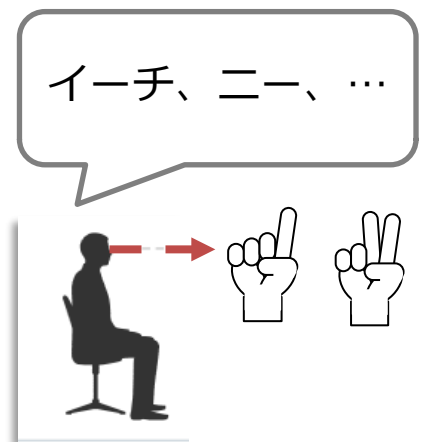

## ● 録音後の調整ポイント

### ポイント1：自声処理 (OVP) の調整

自声処理 (OVP) の画面に調整するスライダーがあります。デフォルトは中ですが、要望に応じて処理を弱めたり強めたりできます

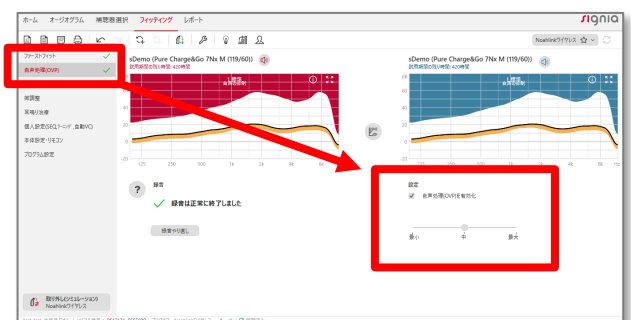

### ポイント2：ボリュームアップ

自声処理 (OVP) の本当の目的は自声を楽にした分、相手の声を大きくすることです。基本調整で全体に**1つ～2つ大きくすることができ**、相手の声が聞きやすくなります。

※個人差はあります

