

補聴器とのペアリング方法



① 補聴器に電池を入れる



② マイクの電源を入れる（5秒）



③ 黄色のランプが点滅。
補聴器を近くに置いておく



④ 黄色のランプが「点灯」で
ペアリング完了




対象機種：NxシリーズのBluetooth搭載モデルのみ

スマホとのペアリング方法



① スマホの「Bluetooth」をON

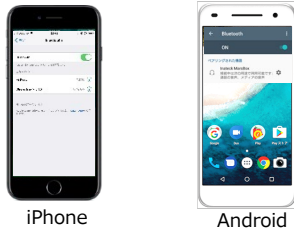

iPhone Android

※機種や世代によって表示が変わることがあります。
詳しくは携帯会社へお問い合わせください


② 電源と+ボタンを同時に押す
（5秒）



③ 青色のランプが点滅。
接続すると点灯



④ 携帯に接続済みと表記される

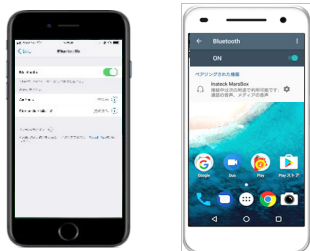

iPhone

Android


※機種や世代によって表示が変わることがあります。
詳しくは携帯会社へお問い合わせください

ペアリングの際、PCでの設定は不要です。補聴器の電源ON/OFFとStreamLineMICの電源ON/OFFで簡単に接続できます。

出来ること



① スマホで通話時のマイクとして

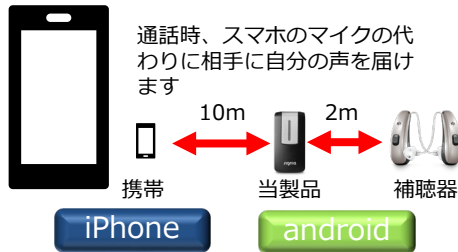

② リモートマイクとして



③ リモコンとして




④ ヘッドフォンとして



使用方法




① 通話時

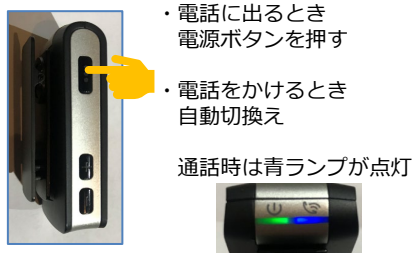

② リモートマイク利用時



③ リモコンとして

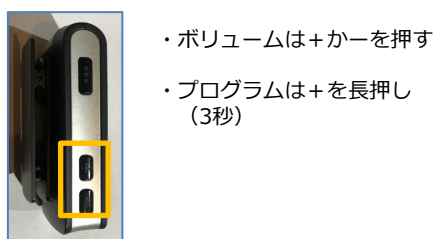

④ ヘッドフォンとして



～ワンポイント～

- 連続使用時間 6時間、●連続待機時間 36時間、●充電時間 2時間